

elma clean 10 (EC 10)

ALKALISCHES REINIGUNGSKONZENTRAT UNIVERSALREINIGER

Beschreibung

Geeignet zur gründlichen Ultraschall-Reinigung von Labor-, medizinischen, zahnärztlichen & -technischen Instrumenten sowie Gegenständen aus Stahl, Glas, Kunststoff, Keramik.

Auch zur Reinigung von: Kronen, Abdrucklöffeln aus Edelstahl.

Entfernt: Blut, Speichel, Proteine, Eiweiß- und Knochenreste sowie Fette, Öle, Schleif- und Polierpasten.

Nicht geeignet für: Aluminium, Zink bzw. Leichtmetall-Legierungen und spannungsrissegefährdete Kunststoffe wie z.B. ABS und PC.

Anwendung und Dosierung

Dosierung für Ultraschall- und Tauchbad: 5%ig in Wasser, bei starker Verschmutzung ggf. höher dosieren.

Idealer Temperaturbereich: 50 – 80°C.

Frische Eiweiß-, und Blutansammlungen im Kalten reinigen, da sonst Koagulation die Reinigung erschwert.

Reinigungszeit: Ultraschall: 4 – 10 Min. Tauchbad ohne Ultraschall: 15 – 30 Min.

Nach dem Reinigen unter fließend Wasser abspülen.

Hotline Anwendungsberatung

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-germany.com

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma clean 10 (EC 10) ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Ätzend (C, R34) eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit den Reinigungskemikalien um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 1045 g/l, pH (Konzentrat): 12 – 12,5. Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: <5% nichtionische Tenside, <5% Phosphate, <5% NTA.

Entsorgung des Reinigungsbades

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.

Das Reinigungsbad kann nach Neutralisation entsprechend den örtlichen pH-Grenzwerten in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zulässt. Neutralisationsempfehlung: Im Ultraschallbad mit Essig- oder Zitronensäure, nicht aber mit Salz- oder Schwefelsäure neutralisieren.

Abfallschlüssel: 20 01 29*, „Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten“.

Restentleerte Verpackungen können unentgeltlich zurückgegeben werden. Zuvor Gebinde mit Wasser ausspülen und entleeren.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1l, 5l, 10l und 25l. Nur im verschlossenen Originalbehälter oberhalb 5°C aufbewahren. Nicht zusammen mit Säuren lagern.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist Gefahrgut (Klasse 8, UN 1824) gemäß GGV für alle Transportarten.

Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-germany.com

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

www.elma-germany.com