

# **elma clean 25 (EC 25)**

**ALGINAT- UND GIPSENTFERNER  
GEBRAUCHSFERTIGES WÄSSRIGES REINIGUNGSBAD**

## **Beschreibung**

Gebrauchsfertiges Reinigungsbad. Gut geeignet zur gründlichen Ultraschall-Reinigung von:

- Abdrucklöffeln und zahnärztlichen Instrumenten,
- Instrumenten aus Edelstahl, Glas und Keramik,
- Kunststoffen.

Entfernt: Alginate, Dentalgipse.

Leichtmetall-Legierungen (Al, Mg, Zn) zuvor auf Beständigkeit prüfen. Anlaufgefahr bei schlecht vernickelten Materialien (z.B. alte Abdrucklöffel).

## **Anwendung und Dosierung**

**Alginate:** unverdünnt bei 60 – 70°C ca.15 – 45 min. im Ultraschallbad; Alginate lassen sich danach leicht von Abdrucklöffeln abheben.

**Dentalgipse:** bei 40 – 70 °C ca. 1 – 3 min. im Ultraschallbad.

Nach dem Reinigen gut unter fließendem Wasser abspülen und evtl. Reste abbürsten.

## **Hotline Anwendungsberatung**

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: [chemlab@elma-germany.com](mailto:chemlab@elma-germany.com)

## **Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge**

*elma clean 25 (EC 25)* ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Reizend (Xi, R36) eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit den Reinigungschemikalien um.

## **Physikalisch-Chemische Charakterisierung**

Dichte: 1082 g/l, pH 11 – 11,5 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: <5% anionische Tenside, 15-30% NTA.

## **Entsorgung des Reinigungsbades**

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar. Das Reinigungsbad kann nach Gebrauch entsprechend den örtlichen pH-Grenzwerten in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zulässt.

Abfallschlüssel: 07 06 01\*, „wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen“.

Restentleerte Verpackungen können unentgeltlich zurückgegeben werden. Zuvor Gebinde mit Wasser ausspülen und entleeren.

## **Lieferformen, Lagerung und Transport**

Gebinde: 1l, 5l, 10l und 25l. Nur im verschlossenen Originalbehälter bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C aufbewahren.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist kein Gefahrgut gemäß GGV für alle Transportarten.

**Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG**

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen

e-mail: [info@elma-germany.com](mailto:info@elma-germany.com)

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

[www.elma-germany.com](http://www.elma-germany.com)