



INSTRUMENTENREINIGUNG: FLÜSSIG

Mucadont®-ZYMAKTIV

Enzymatischer Hochleistungsreiniger mit einzigartiger Wirkbasis für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben



EINSATZGEBIETE

- Präparat für die sichere Aufbereitung hochempfindlicher medizinischer Instrumente
- ideal dort anzuwenden, wo der medizinische Anspruch durch regulatorische Vorgaben besonders hoch ist
- eignet sich hervorragend für den Einsatz im Ultraschallbad und zur Vorreinigung vor maschinellen Aufbereitungsverfahren

EIGENSCHAFTEN

- die einzigartige ZYMAKTIV-Formel knackt und entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Blut, Eiweiß und Biofilme
- ideal zur RKI konformen Endoskop-aufbereitung
- duftet sympathisch frisch
- frei von Alkalien und sonstigen materialaggressiven Verbindungen
- integrierter, aktiver Korrosionsschutz
- Einwirkzeit bereits ab 3 Minuten
- pH-Wert (1 %ig, 20 °C) ca. 6

BESONDERHEITEN

- für spezielle Reinigungsaufgaben mit den Instrumenten Desinfektionspräparaten Mucocit-T und Mucadont-IS kompatibel
- Materialverträglichkeit von Pentax geprüft
- für Instrumente der Firma RICHARD WOLF freigegeben


ANWENDUNGSKONZENTRATION

0,3 % bis 5 %
je nach Verschmutzungsgrad


DIE WIRKUNGSWEISE DER ZYMAKTIV-FORMEL

Mucadont-ZYMAKTIV – die ideale Kombination aus aktiven Hochleistungsenzymen, Tensiden und Reinigungsverstärkern:
Sie greifen jegliche – auch hartnäckige – organische Rückstände

gezielt an, spalten sie und lösen sie auf. Innovative Tenside und Reinigungsverstärker binden die gelösten Partikel und sorgen für ihren sicheren Abtransport.

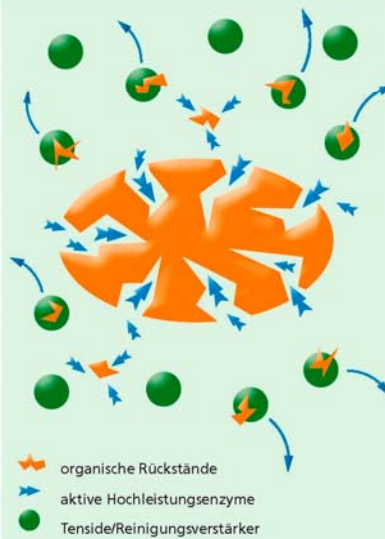

Entfernung organischer Rückstände

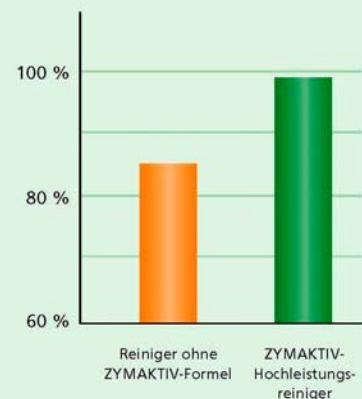

INHALTSSTOFFE

5–15 % nichtionische Tenside, <5 % Enzyme (Protease, Amylase), kationische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe

HANDELSFORMEN

2.000 ml Flasche Art.-Nr. 60110 (VPE 6)
5.000 ml Kanister Art.-Nr. 60111 (VPE 3)



Mucadont®-ZYMAKTIV

Geprüfte Kompatibilität mit Mucocit-T und Mucadont-IS

Mucadont-ZYMAKTIV ist für spezielle Reinigungsaufgaben auch mit den Instrumenten-Desinfektionspräparaten **Mucocit-T** und **Mucadont-IS** kompatibel und verbindet somit perfekte Reinigung und sichere Desinfektion in einem Arbeitsgang.

Dosieranleitung:

Kombination Mucadont-ZYMAKTIV mit aldehydfreiem Mucocit-T

Mucadont-ZYMAKTIV	Mucocit-T	Einwirkzeiten
1 %	1 %	60 Minuten
2 %	2 %	30 Minuten
3 %	3 %	15 Minuten

Kombination Mucadont-ZYMAKTIV mit aldehydhaltigem Mucadont-IS

Mucadont-ZYMAKTIV	Mucadont-IS	Einwirkzeiten
1 %	1 %	60 Minuten
2 %	2 %	30 Minuten
3 %	3 %	15 Minuten